

Инструкция по использованию термопластических кап REVYLINE

- Перед использованием термо-капы Revyline необходимо тщательно почистить зубы зубной щеткой и нитью;
- Погрузить капы в воду температурой 80 градусов на 10-12 (Важно: Для лучшего результата не перегревайте капы);



- Поместить капы в рот и плотно прикусить для получения отпечатков зубов двух челюстей;



- Подержать капы на зубах в течение 10-15 секунд, пока термопластические капы не затвердеют и не примут форму ваших зубов. Снять капы.



- Нанести на внутренни поверхности кап отбеливающий гель или другое средство;
- Надеть капы на зубы и плотно их прижать, удалить салфеткой излишки геля;
- Носить капы приблизительно 30 минут;
- Снять капы, тщательно промыть водой. Остатки геля на зубах удалить щеткой.